


Souprava pro testování antigenů 2019-nCoV

(Imunochromatografie z koloidního zlata)

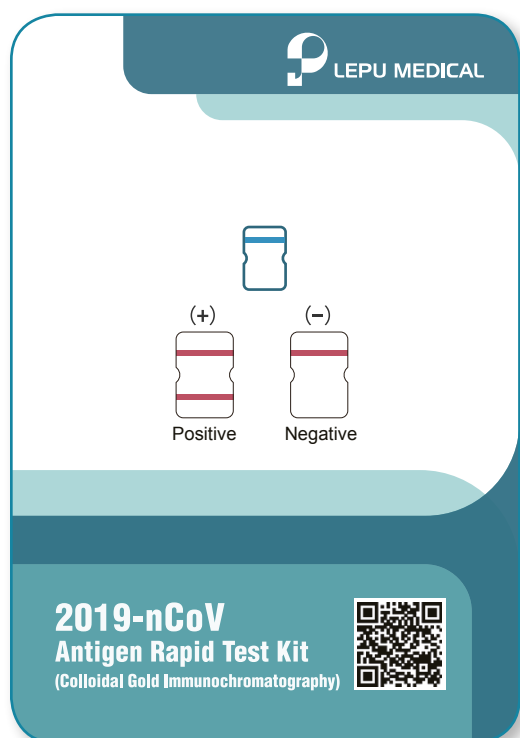

NOVÁ STUDIE

Senzitivita 95,06 % (až 98,54 % při Ct≤25)
Specifická 99,62%

- 1 Šetrný výtěr z přední části nosu
- 2 Neinvazivní
- 3 Jednoduché použití
- 4 Praktický, není potřeba přístroj
- 5 Rychlý, výsledek za 15 minut
- 6 Stabilní, s vysokou přesností
(O spolehlivosti testu se můžete přesvědčit přímo z rozsáhlé studie, kterou naleznete www.quickseal.eu)
- 7 Testy splňují všechny podmínky, které ZP požaduje
- 8 Test proplácen zdravotní pojišťovnou

Souprava je určena ke kvalitativní detekci antigenů 2019-nCoV v klinickém vzorku. Testovací kazeta je založena na specifické reakci protilátka-antigen a technologii imunoanalýzy.

WHO doporučuje imunotesty k detekci antigenů v diagnostice infekce 2019-nCoV.

Vzorek	Výsledek	Balení
výtěr z nosu	za 15 min.	25 ks



Nemocnice



Odběrová
místa



Letiště



Doprava




Hotel




Společnosti




Hromadný
screening

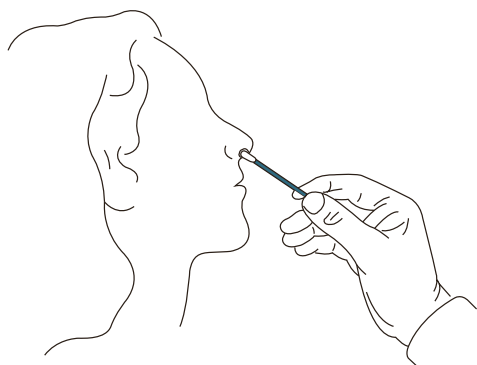


Krok 1: Odeberte vzorek pomocí výtěrové tyčinky

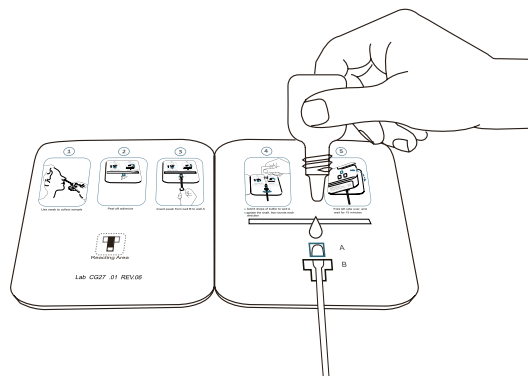

Krok 2: Protáhněte výtěrovou tyčinku se vzorkem jamkou B do jamky A a přidejte 6 kapek pufru do jamky A.

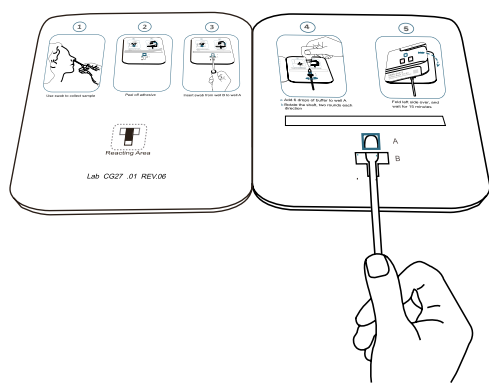

Krok 3: Tyčinku dvakrát otočte ve směru a proti směru hodinových ručiček.

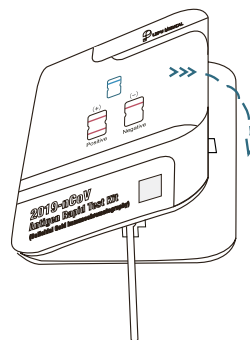


Krok 4: Odstraňte ochranný kryt fixačního lepidla. Splete levou a pravou stranu k sobě a vyčkejte 15 minut.

 **Interpretace výsledku**


Pozitivní (+)



Negativní (-)

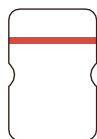

Neplatný

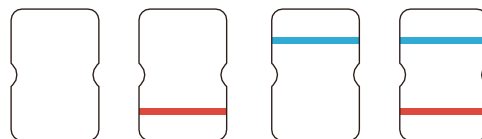

HCP medipro